



EDENTA Etablissement, Industriestrasse 13, LI-9486 Schaanwald – Liechtenstein
Tel.: 00423 375 20 50 e-mail: info@edenta.com



SRN: LI-MF-000011937

Polírozó / Arkansas kövek

DiaGloss / TopGloss / Exa Special / Exa Composit / Flexi-Snap / CeraGloss / StarGloss / StarTec / Cerapol plus / Exa Cerapol / Cerapol Super / Alphaflex / Alphaflex szuper zöld / Goldstar / Amalgam Reducer / Nylon Brush / OrthoFlex / Exa Intrapol / Exa Dental / Prophylaxis Pasteless / Prophylaxis Cups / Prophylaxis Cups with nubs / Prophylaxis Brushlets / Screw-In Brushlets / Snap-On Brushlets / TopBrush / Abrasives / Arkansas / CompGloss

Alapvető UDI-DI:++E31216412DU

Használat: Újrafelhasználható eszközök, nem steril állapotban szállítva – az első használat előtt elő kell készíteni a használatra.

Részletes használatra való előkészítési ajánlások a DIN EN ISO 17664 szabvány szerint
www.edenta.com

Tárolás: Védje a becsomagolt eszközöket a magas hőmérséklettől és az UV-sugárzástól. Száraz és tiszta helyen tárolandó, ne tárolja olyan helyiségben, ahol oldószereket vagy vegyszereket tartanak. Tárolási hőmérséklet: 15 °C – 25 °C | Szállítási hőmérséklet: 10 °C – 35 °C.

Rendeltetés:

A polírozókat a fogászati restaurációs anyagok, például cirkónia, kerámia, kompozit, nem nemesfém ötvözetek, nemesfém és amalgám intraorális polírozására (eltávolítására, simítására, magasfényű polírozására) használják. A fogak és a fogsorok felszínének javítására és esztétikusan kellemes felület elérésére használják. A célfelhasználók a fogorvosok (fogorvostanhallgatók) és a fogászati szakemberek (profilaxis), akik a polírozókat a fogászati kezelések részeként használják a professzionális egészségügyi intézményekben (fogorvosi rendelő, fogászati klinika).

Leírás:

A polírozók a zománc/foglepedék, tömések, inlay-ek, koronák, hidak és fogpótlások felületi polírozására, valamint a zománcra lévő ragasztómaradványok eltávolítására szolgálnak. Intravénásan alkalmazzák. A polírozók segítenek a fogfelületek esztétikájának és simaságának javításában. A kívánt polírozási hatástól függően különböző formákban, kialakításokban/szemcseméreteken kaphatók. A polírozók különböző típusokban kaphatók: univerzális polírozók, előpolírozók, fényes polírozók és magasfényű polírozók. Az alkalmazástól függően a polírozók különböző formájúak, mint például hengeres, kúpos, korong alakú és lamellás. Különbséget kell tenni az újrafelhasználható és az egyszer használatos (eldobható) polírozók között. A polírozók nem steril állapotban kerülnek forgalomba. A polírozók nyeleit úgy tervezték, hogy illeszkedjenek a szabványos kézidarabokhoz. Kizárólag az EN ISO 14457:2017 szabvány szerinti meghajtókban (kézi-/könyökdarabok) való használatra tervezték.

Használat:

A polírozókat minden intraorális előkészítéshez használják, a kontúrozástól és a finírozástól a magasfényű polírozásig. Az interdentális homorú/domború felületek és az okkluzális zónák minőségének és teljesítményének javítására szolgálnak. Természetes csillogás vagy csillogó felület létrehozására minden tömőanyagon, például amalgámon, nemesfém ötvözeteken, kerámiákon vagy műanyagokon. A speciális gyémántszemcsés polírozók használatával esztétikailag igényes eredmények eléréséhez is minden modern cirkonoxid-kerámia anyagon.

Klinikai előny:

Az esztétika helyreállítása.

Fogászati kezelési szimbólumok:

Tömés-megmunkálás



Fogszabályozás



Profilaxis



Korona/híd technika

A fogászati kezelési szimbólumok csupán a polírozók alkalmazási lehetőségeiről adnak tájékoztatást.

A felhasználó/(fogorvosi diplomával rendelkező) szakember az indikációtól függően saját felelősségére dönt a konkrét alkalmazásról.

Biztonsági utasítások:

- Az eszközöket csak (fogorvosi diplomával rendelkező) szakemberek használhatják.
- A pácienseknél való első használat előtt, valamint közvetlenül az egyes használatok után az eszközöket fertőtleníteni kell, meg kell tisztítani, meg kell szárítani és sterilizálni kell.
- lásd a validált eljárást itt:

Részletes használatra való előkészítési ajánlások a DIN EN ISO 17664 szabvány szerint
 www.edenta.com

- A polírozók és a kerámia csiszolófejek fertőtlenítésére lúgos oldatok nem használhatók. A tisztító- és fertőtlenítőoldatokon kifejezetten fel kell tüntetni, hogy „alkalmas gumipolírozókhoz vagy műanyaghoz/szilikonhoz” (a forgó műszerek tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló szerek nem tartalmaznak polírozókat). A koncentrációra és a behatási időre vonatkozóan be kell tartani a gyártó utasításait.
- A csomagoláson a  szimbólummal jelölt egyszer használatos eszközök az első használat előtt csak kézzel fertőtleníthetők (mosó- és fertőtlenítőgépekhez és gőzsterilizátorokhoz nem alkalmasak), megfelelő szer (pl. HELVEMED Instrument Forte) használatával.
- Figyelje meg az üzemi fordulatszámot (ford./perc) – a maximális fordulatszám a termék csomagolásán található. Az eszközök fordulatszám-tartományon kívüli használata az eszközök töréséhez és a páciens és a felhasználó sérüléséhez vezethet.
- Biztosítson kellő vízpermetes hűtést (**min. 50 ml/perc**) a munkadarabon.
- Csak enyhe érintkezési nyomással polírozzon.
- A polírozót mindig forgó helyzetben helyezze a felületre, és körkörös mozdulatokkal polírozzon.
- El kell kerülni az eszközök túlzott érintkezési nyomás, valamint billentés és emelés miatti blokkolását (fokozott törésveszély).
- A túlzott érintkezési erők vagy a nem megfelelő vízűtés károsíthatja a restaurációt és a környező szöveteket, és felgyorsíthatja a polírozófej kopását.
- A meghajtórendszereknek (fogászati kézidarabok) műszakilag kifogástalan állapotban kell lenniük.
- Rögzítse az eszközöket a lehető legmélyebbre a fogászati kézidarabokba, és ellenőrizze, hogy szorosan illeszkednek-e.
- A sérült, elgörbült vagy már nem zökkenőmentesen forgó eszközöket azonnal ki kell szelektálni, és a továbbiakban nem szabad használni.
- Kofferdam használata ajánlott.
- Védőszemüveg használata ajánlott.

Lehetséges mellékhatások:

Jelenleg nincsenek ismert mellékhatások.

A használatra előkészített eszközök tárolása:

A használatra előkészített eszközöket higiénikusan karbantartott állványokban, tálcákban vagy más megfelelő tárolóedényekben és az eredeti csomagolásukban, szobahőmérsékleten kell tárolni az első használatig. Ugyanez vonatkozik a sterilizált és a sterilizálási csomagolással ellátott eszközökre is. A tárolásnak a por, a nedvesség és az újrasszennyeződés elleni védelemmel kell történnie.

Ártalmatlanítás:

A biztonságos ártalmatlanítás érdekében az eszközöket törésálló, átszűrőbiztos és tömített tárolóedényekben (szennyeződés elleni védelem) kell elhelyezni. Az orvosi műszerek ártalmatlanítására vonatkozó helyi, hatósági előírásokat be kell tartani!

Súlyos váratlan események:

Tájékoztassa a felhasználót és/vagy a páciensét arról, hogy az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett minden súlyos váratlan eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a páciens letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

A használt szimbólumok leírása:

	Orvostechnikai eszköz		Gyártó		A gyártás dátuma
	Csomagolási egység		Kövesse a használati utasítást: www.edenta.com		Rendelési szám
	ISO-szám		Tételszám – a tétel nyomon követhetősége érdekében		A legnagyobb megengedett fordulatszám
	A fordulatszámra vonatkozó ajánlás		Ultrahang		Termikus fertőtlenítő
	Autokláv				

EDENTA Etabl, LI-9486 Schaanwald, Liechtenstein

|B28 | 1.1 kiadás | 01.04.2025 |