



EDENTA Etablissement, Industriestrasse 13, LI-9486 Schaanwald - Liechtenstein
Tel.: 00423 375 20 50 e-posta: info@edenta.com



SRN: LI-MF-000011937

Parlatıcı / Arkansas taşları

DiaGloss / TopGloss / Exa Special / Exa Composit / Flexi-Snap / CeraGloss / StarGloss / StarTec / Cerapol plus / Exa Cerapol / Cerapol Super / Alphaflex / Alphaflex süper yeşil / Goldstar / Amalgam Reducer / Nylon Brush / OrthoFlex / Exa Intrapol / Exa Dental / Prophylaxis Pasteless / Prophylaxis Cups / Prophylaxis Cups with nubs / Prophylaxis Brushlets / Screw-In Brushlets / Snap-On Brushlets / TopBrush / Abrasives / Arkansas / CompGloss

Temel UDI-DI: ++E31216412DU

Kullanım: Yeniden kullanılabilir aletler, steril olmayan şekilde tedarik edilir - ilk kullanımdan önce yeniden işleyin.

DIN EN ISO 17664 uyarınca ayrıntılı yeniden işleme önerileri  www.edenta.com

Depolama: Paketlenmiş aletleri yüksek sıcaklıklardan ve UV radyasyonundan koruyun. Kuru ve temiz bir yerde saklayın, solvent veya kimyasal madde içeren bir odada saklamayın. Depolama sıcaklığı: 15°C - 25°C | Taşıma sıcaklığı: 10°C - 35°C.

Kullanım amacı:

Parlatıcılar, zirkonya, seramik, kompozit, değerli olmayan alaşımlar, değerli metal ve amalgam gibi dental restoratif malzemelerin ağız içi parlatılması (çıkarılması, düzleştirilmesi, yüksek parlaklıkta parlatılması) için kullanılır. Dişlerin ve protezlerin yüzeylerini iyileştirmek ve estetik olarak hoş bir yüzey elde etmek için kullanılırlar. Hedeflenen kullanıcılar, profesyonel sağlık tesislerinde (diş muayenehanesi, diş kliniği) diş tedavilerinin bir parçası olarak parlatıcıları kullanan diş hekimleri (diş hekimliği öğrencileri) ve profesyonel diş teknisyenleridir (profilaksi).

Açıklama:

Parlatıcılar mine/diş plakları, dolgular, inleyler, kronlar, köprüler ve protez malzemelerinin yüzeylerinin parlatılmasında ve ayrıca minedeki yapışkan kalıntıların temizlenmesinde kullanılır. Ağız içinde uygulanır. Parlatıcılar diş yüzeylerinin estetiğini ve pürüzsüzlüğünü artırmaya yardımcı olur. İstenen parlatma etkisine bağlı olarak farklı şekillerde, tasarımlarda / kum seviyelerinde mevcuttur. Parlatıcılar, universal parlatıcılar, ön parlatıcılar, parlak parlatıcılar ve yüksek parlaklıkta parlatıcılar olmak üzere farklı tiplerde mevcuttur. Uygulamaya bağlı olarak, parlatıcılar silindirik, konik, disk şeklinde ve lamel gibi farklı şekillere de sahiptir. Yeniden kullanılabilir ve bir defa kullanılabilir (tek kullanımlık) parlatıcılar arasında fark vardır. Parlatıcılar steril olmayan şekilde satılır. Parlatıcıların şaftları standart el aletlerine uyacak şekilde tasarlanmıştır. EN ISO 14457:2017 standardına uygun olarak sadece sürücülerde (düz/kontra açılı el aletleri) kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Uygulama:

Parlatıcılar, konturlama ve finisajdan yüksek parlaklıkta parlatmaya kadar tüm ağız içi hazırlıklar için kullanılır. İnterdental konkav/konveks yüzeylerin ve oklüzal bölgelerin kalitesini ve performansını artırmak için kullanılırlar. Amalgam, değerli metal alaşımları, seramikler veya plastikler gibi tüm dolgu malzemeleri üzerinde doğal bir parlaklık veya yüksek parlaklık oluşturmak için. Ayrıca özel elmas kumlu parlatıcılar ile, tüm modern zirkonyum oksit seramik malzemeler üzerinde estetik açıdan sofistike sonuçlar için de kullanılır.

Klinik fayda:

Estetiğin restorasyonu.

Diş tedavi sembolleri:

Dolgu işlemleri



KFO (ortodonti)



Profilaksi



Kron/köprü tekniği

Diş tedavisi sembolleri sadece parlaticıların uygulama seçenekleri hakkında bilgi verir.

Kullanıcı / uzman personel (eğitilmiş diş hekimi / teknisyen) endikasyona bağlı olarak spesifik uygulamaya kendi sorumluluğunda karar verir.

Güvenlik talimatları:

- Aletlerin sadece uzman personel (eğitilmiş diş hekimi / teknisyen) tarafından kullanılması.
- Aletler, hastalar üzerinde ilk kez kullanılmadan önce ve her kullanımdan hemen sonra dezenfekte edilmeli, temizlenmeli, kurutulmalı ve sterilize edilmelidir.
- aşağıdaki onaylanmış prosedüre bakın

DIN EN ISO 17664 uyarınca ayrıntılı yeniden işleme önerileri  www.edenta.com

- Parlaticıları ve seramik taşlama disklerini dezenfekte etmek için alkali çözeltiler kullanılmamalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyon solüsyonlarında açıkça "kauçuk parlaticılar veya plastikler/silikonlar için uygundur" ibaresi bulunmalıdır (döner aletler için temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri parlaticı içermez). Konsantrasyon ve temas süresi için üreticinin talimatlarına uyulmalıdır.
- Ambalaj  üzerinde işaretlenmiş tek kullanımlık ürünler ilk kullanımdan önce sadece uygun bir madde (örn. HELVEMED Instrument Forte) ile manuel olarak dezenfekte edilebilir (yıkayıcı dezenfektörler ve buharlı sterilizatörler için uygun değildir).
- Çalışma hızına (rpm) dikkat edin - maksimum hız ürün ambalajında belirtilmiştir. Aletlerin hız aralığı dışında kullanılması, aletin kırılmasına ve hasta ile kullanıcının yaralanmasına neden olabilir.
- Çalışma parçası üzerinde yeterli su spreyi soğutması **(min. 50 ml/dak)** sağlayın.
- Sadece hafif temas basıncı ile cilalayın.
- Parlaticıyı her zaman yüzeye döner konumda yerleştirin ve dairesel hareketlerle parlatın.
- Aşırı temas basıncının yanı sıra eğme ve kaldıraç gibi kullanmaya bağlı olarak aletleri bloke etmekten kaçının (kırılma riski artar).
- Aşırı temas kuvvetleri veya yetersiz su soğutması restorasyona ve çevre dokuya zarar verebilir ve parlaticı gövdesinin aşınmasını hızlandırabilir.
- Sürücü sistemleri (dental el aletleri) teknik olarak kusursuz durumda olmalıdır.
- Aletleri dental el aletlerinin içine mümkün olduğunca derin bir şekilde sıkıştırın ve sıkıca oturduklarını kontrol edin.
- Hasarlı, bükülmüş veya dairesel olarak çalışmayan aletler derhal ayıklanmalı ve artık kullanılmamalıdır.
- Kauçuk dam kullanılması tavsiye edilir.
- Güvenlik gözlüklerinin kullanılması tavsiye edilir.

Olası yan etkiler:

Şu anda bilinen bir yan etkisi yoktur.

Yeniden işlenmiş aletlerin depolanması:

Yeniden işlenen aletler hijyenik olarak muhafaza edilen stantlarda, tepsilerde veya diğer uygun kaplarda ve ilk defa kullanılıncaya kadar orijinal ambalajlarında oda sıcaklığında saklanmalıdır. Aynı durum sterilize edilmiş ve sterilizasyon ambalajına sahip aletler için de geçerlidir. Depolama toz, nem ve yeniden kirlenmeye karşı korunmalıdır.

İmha:

Güvenli bir şekilde imha etmek için, aletler kırılmaz, delinmez ve sızdırmaz kaplara yerleştirilmelidir (kontaminasyon koruması). Tıbbi aletlerin imhası için yerel, resmi yönetmeliklere uyulmalıdır!

Ciddi olaylar:

Kullanıcıya ve/veya hastaya not; cihazla ilgili olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olayın imalatçıya ve kullanıcının ve/veya hastanın yerleşik olduğu Üye Devletin yetkili makamına bildirilmesi gereklidir.

Kullanılan sembollerin açıklaması:

	Tıbbi cihaz		Üretici firma		Üretim tarihi
	Paketleme birimi		Kullanım talimatlarını takip edin www.edenta.com		Sipariş numarası
	ISO numarası		Lot numarası - partinin izlenebilirliği için		izin verilen maksimum hız
	Hız önerisi		Ultrason		Termal dezenfektör
	Otoklav				

EDENTA Etabl, LI-9486 Schaanwald, Liechtenstein
|B28 | 1.1 baskı | 01.04.2025 |